

### fi Mikä on Mepiform®?

Mepiform on itsekiinnittyvä pehmeä silikonisidos arpien hoitoon.

Materiaalit: Polyakrylaatti, polyuretaani, silikoni, viskoosi

### Mihin Mepiform® on tarkoitettu?

Mepiform on tarkoitettu sekä vanhojen että uusien hypertrofisten ja keloïdien arpien hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös umpeutuneissa haavoissa ennaltaehkäisevästi estämään hypertrofista tai keloïdia arpeutumista.

### Huomioitavaa

- Mepiformia ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia tuotteen materiaaleille/ komponenteille.
- Jos ilmenee ihottumaa tai iho muuttuu möräksi ja valkoiseksi (maseraatio), poista sidos ja anna ihon toipua, kunnes oire on hävinnyt. Jatka sitten hoitoa pidentäen vähitellen hoitoaikaa. Jos oireet eivät häviä, lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen tai lääkäriin.
- Älä käytä avoimiin haavoihin.

### Käyttöohjeet

#### Sidoksen vaihto ja poisto

- Mepiformin optimaalinen käyttöaika on 24 tuntia vuorokaudessa. Poista sidos kerran päivässä ihon tarkistusta ja pesua varten. Sidos voidaan tämän jälkeen asettaa takaisin.
- Mepiform vaihdetaan normaaliolosuhteissa 7 päivän välein tai kun sidos ei enää kiinnity kunnolla.
- Mepiform on suihkunkestävä.

Mepiformissa on UV-suojakerroin (UPF) 5 arven suojaamiseksi. Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaan.

### Muita tietoja

Jos Mepiform-tuotteen käytön yhteydessä ilmenee vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Mepiform® ja SafetaC® ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.


Julkaistu 2021-05

# Mepiform®

5 x 7,5 cm  
2 förband/bandasjer/  
bandager/sidosta

Självhäftande/Selvklebende mjukt/myk/blød silikonförband/-bandasje/-bandage för/til gamla och nya ärr/arr/ar

Itsekiinnittyvä pehmeä silikonisidos vanhojen ja uusien arpien hoitoon

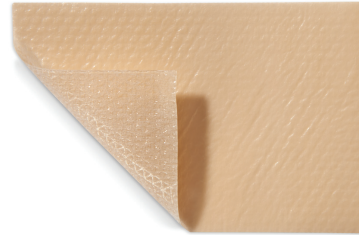

- Skonsamt/skånsomt mot huden Hellävarainen iholle
- Duschbart/kan dusjes med/brusetæt Suihkunkestävä
- Skydd/beskyttelse mot sol- och UV-strålar Suojaa auringolta ja UV-säteiltä
- Kan bäras/brukes/bruges i upp till 7 dagar/dager/dage Voidaan käyttää jopa 7 päivää

  
**Mölnlycke®**

Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,  
SE-402 52 Göteborg, Sweden

[www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)





REF 293770

Made in Finland



7 332551 949327

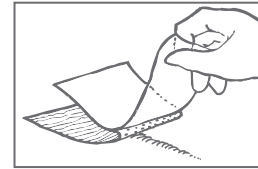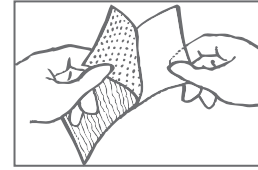

### Användning / Käyttö

1. Öppna förpackningen/pakningen och ta ut förbandet/bandasjen/bandagen. Avaa pakkaus ja ota sidos esille.
2. Klipp till förbandet/bandasjen/bandagen i lämplig/passende storlek/størrelse om det behövs. Mepiform ska överlappa äret och den omkringliggande huden med minst 1 cm.  
Leikkaa sidos tarvittaessa sopivan kokoiseksi. Mepiform-sidoksen on peitettävä arpea ympäröivää ihoa vähintään 1 cm.
3. Se till att området är torrt/tørt när Mepiform appliceras/legges på. När produkten används tillsammans med salva eller kräm/creme, se till att förbandet/bandasjen/bandagen täcker/dekker ett område som är större än det insmorda/indsmurte området.  
Kun asetat Mepiformia, tarkista, että alue on kuiva. Jos sidosta käytetään salvan tai voiteen kanssa, varmista, että sidos ylittää voidealueen reunat.
4. Ta bort skyddsfilmen/fjern beskyttelsesfilmen och applicera/legg den självhäftande/selvklebende sidan av Mepiform på äret utan att sträcka förbandet/bandasjen/bandagen.  
Poista taustakalvo ja aseta Mepiform-sidoksen kiinnittyvä puoli arven päälle sidosta venyttämättä.

Mepiform®


5 x 7,5 cm

2 förband/bandasjer/bandager/sidosta

# Mepiform®

5 x 7,5 cm  
2 förband/bandasjer/  
bandager/sidosta

# ÄRR/ARR- BEHANDLING ARPIEN HOITOON

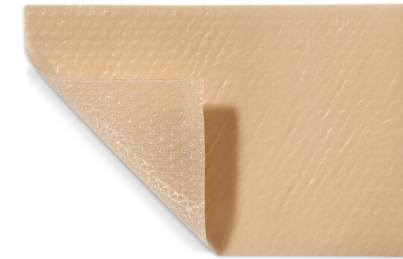

Förebygger och reducerar  
ärrbildning/arrdannelse

Ehkäisee ja vähentää arpia

  
**Mölnlycke®**

**SafetaC**  
TECHNOLOGY



**sv** Vad/Hva/Hvad är Mepiform®?  
**no** Mepiform er et selvheftende/selvklebende mjukt/myk/blødt  
**da** silikonforband/-bandasje/-bandage for arrbehandling.  
Materialinnehåll: Polyakrylat, polyuretan, silikon, viskos

#### Vad/Hva/Hvad används/brukes Mepiform för?

Mepiform är utformat/udviklet för behandling av både nya och gamla hypertrofiska ärr och keloider. Det kan även användas/brukes på slutna/lukkede sår för att förebygga hypertrofiska ärr och keloider.

#### Försiktighetsåtgärder/forholdsregler

- Mepiform bör inte användas/brukes av personer med känd/kendt överkänslighet/overfølsomhet mot ingående material/komponenter i produkten.
- Vid utslag/udslæt eller om huden blir våt och vit/hvid (maceration), avlägsna/løsne/fjern förbandet/bandasjen/bandagen och låt/la huden vila och återhämta/komme sig tills symtomen har försvunnit. Därefter kan behandlingen inledas/fortsettes igen/genoptages, öka behandlingstiden successivt/gradvist. Om symtomen kvarstår/ikke forsvinner, avbryt behandlingen och kontakta vårdpersonal/helsepersonell/sundhedspersonale eller läkare/lege.
- Använd/bruk inte på öppna/åbne sår.

#### Bruksanvisning/Brugsanvisning

##### Byte/skift och borttagande/fjerning/fjernelse av förband/bandasje/bandage

- Mepiform ska bäras dygnet/døgnet runt för bästa behandling. Avlägsna/løsne/fjern förbandet/bandasjen/bandagen en gång per dag för inspektion och tvätt/vask av huden. Förbandet/bandasjen/bandagen kan därefter återappliceras/legges på igjen.
- Mepiform bör under normala förhållanden/forhold bytas/skiftes var/hver 7:e dag eller när förbandets/bandasjens/bandagens vidhäftningsförmåga/klebeevne inte längre är tillräcklig/god.
- Mepiform är duschbart/kan dusjes med/brusetæt.

Mepiform har UV-skyddsfaktor/beskyttelsesfaktor (UPF) 5 för att skydda/beskytte ärret.

Avfall/Affald ska hanteras enligt lokala miljörutiner/miljøprosedyrer/miljømessige procedurer.

#### Övrig information

Om en allvarlig incident/hendelse/uheld med koppling/forbindelse till Mepiform inträffar ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care och till ansvarig myndighet.

Mepiform® och Safetac® är registrerade varumärken som tillhör Mölnlycke Health Care AB.