


Mölnlycke®

Mepilex® Border Flex

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Carré

Pansement hydrocellulaire
siliconé auto-fixant

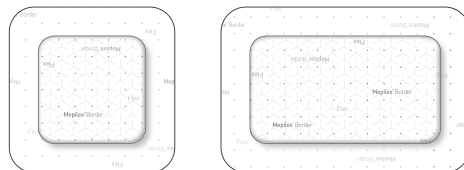

STERILE EO

CE 2797

Revised 2021-06

40295-40

PD-702352 rev. 00

Manufacturer / Fabricant

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

Master PD-521425 rev. 05



Usage unique



Conservé au sec



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

MD

Dispositif médical



Système de barrière stérile



Taille de la matrice



Pour les plaies faiblement exsudatives



Pour les plaies modérément exsudatives




Pour les plaies hautement exsudatives

www.molnlycke.com/symbols

Mepilex® Border Flex <14 × 15cm



Mepilex® Border Flex ≥14 × 15cm

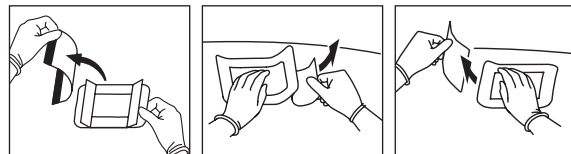

Mepilex® Border Flex

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant

Description du produit

Mepilex Border Flex est un pansement absorbant auto-fixant qui maintient la plaie en milieu humide. La couche externe imperméable protège la plaie des impuretés et des bactéries. Le pansement bénéficie d'une couche, côté plaie, d'enduction de silicone souple issue d'une technologie unique à base d'adhésif siliconé : la Technologie Safetac®. Elle minimise la douleur des patients et le traumatisme sur les plaies et la peau périlésionnelle lors du retrait du pansement.

Mepilex Border Flex est composé :

- d'une enduction de silicone souple (Safetac) et d'un film support;
- d'un coussin flexible et absorbant formé de trois couches : une mousse, un voile de diffusion en non tissé et une couche en fibres super absorbantes, le coussin du pansement bénéficie de la technologie Flex (découpes en Y);
- d'un film externe perméable à la vapeur et imperméable à l'eau, créant une barrière antimicrobienne.

Composition du pansement :

Silicone, polyuréthane, polyacrylate, coton, viscosse, polyester et polyoléfine.

Indications

Mepilex Border Flex est indiqué pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives, telles que les escarres, les ulcères de pied et de jambe, les plaies traumatiques (ex. déchirures cutanées) et les plaies chirurgicales. Mepilex Border Flex peut également être utilisé sur des plaies sèches/nécrosées, en association avec des gels.

Mepilex Border Flex peut être utilisé dans le cadre d'un traitement prophylactique en prévention de lésions cutanées (ex. escarres, phlyctènes postopératoires).

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- Ne pas utiliser le pansement avec des agents oxydants, tels que les solutions d'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène.
- En cas de signes cliniques d'infection, par exemple en présence de fièvre ou si la plaie ou la peau périlésionnelle devient rouge, chaude ou gonflée, consulter un professionnel de santé qui prescrira un traitement anti-infectieux approprié.
- L'utilisation de pansements dans le cadre d'un traitement prophylactique n'exclut pas la prise en charge standard de prévention des escarres, c.-à-d. supports adaptés, positionnement, alimentation, hydratation, soins de la peau et mobilité.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.

Mode d'emploi

Mepilex Border Flex peut être utilisé par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.

1. Sélectionner une taille/forme de pansement appropriée. Le cas échéant, choisir une forme de pansement optimisée pour le site anatomique spécifique.

Pour une utilisation sur des plaies :

Choisir la taille de Mepilex Border Flex appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.

Pour une utilisation préventive :

S'assurer que le coussin du pansement couvre la zone présentant un risque d'escarre ou de lésion tissulaire.

2. Pour une utilisation sur des plaies :

Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.

3. Retirer le premier feuillet protecteur et appliquer face adhésive sur la plaie.

4. Retirer le feuillet protecteur restant, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.

Mepilex Border Flex peut rester en place pendant 7 jours, en fonction de l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou conformément aux protocoles de soins en vigueur.

Pour une utilisation sur des plaies :

- Mepilex Border Flex peut être utilisé sous compression.
- Dans la mesure où Mepilex Border Flex maintient un milieu humide au niveau de la plaie, ce qui facilite la détersion, une augmentation de la taille de la plaie peut d'abord être observée. Il s'agit d'un phénomène normal et attendu.
- La modification du type de pansement peut conduire dans un premier temps à l'augmentation de la quantité d'exsudats. Un renouvellement plus fréquent du pansement pourrait donc s'avérer temporairement nécessaire.

Pour une utilisation préventive :

La zone présentant un risque d'escarre ou de lésion tissulaire doit être inspectée à intervalles réguliers, conformément aux protocoles de soins en vigueur.

L'élimination doit être effectuée conformément aux procédures environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

La mousse de polyuréthane contenue dans le pansement peut jaunir en cas d'exposition à la lumière, à l'air et/ou à la chaleur. Le changement de couleur n'a pas d'influence sur les propriétés du produit lorsque ce dernier est utilisé avant la date de péremption.

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Mepilex Border Flex, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.