

Leitfaden für Dekubitus im Zusammenhang mit medizinischen Geräten – Mepilex® Lite

Mepilex® Lite schützt die Haut, nimmt Feuchtigkeit auf und schützt nachweislich die empfindliche Haut vor äußeren Kräften wie Reibung und Druck, die durch die lange Anwendung von medizinischen Geräten entstehen.^{1,2}


Haftungsausschluss: Über die prophylaktische Verwendung von Verbänden zur Risikominimierung von Dekubitus durch medizinische Geräte wird berichtet, jedoch wurde ihre Verwendung unter PPE im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Dichtigkeit und möglichen Auswirkung auf die Virusübertragung unseres Wissens nach weder von Mölnlycke noch von anderen getestet.

- Mepilex® Lite lässt sich leicht in die gewünschte Form schneiden
- Wenn Sie Mepilex® Lite zuschneiden, lassen Sie die Trägerfolie an Ort und Stelle
- Mepilex Lite haftet durch die Safetac®-Technologie³ sanft auf der Haut



Safetac
TECHNOLOGY

Die Grafiken veranschaulichen verschiedene Einsatzmöglichkeiten zum Schutz der Haut bei der Verwendung medizinischer Geräte

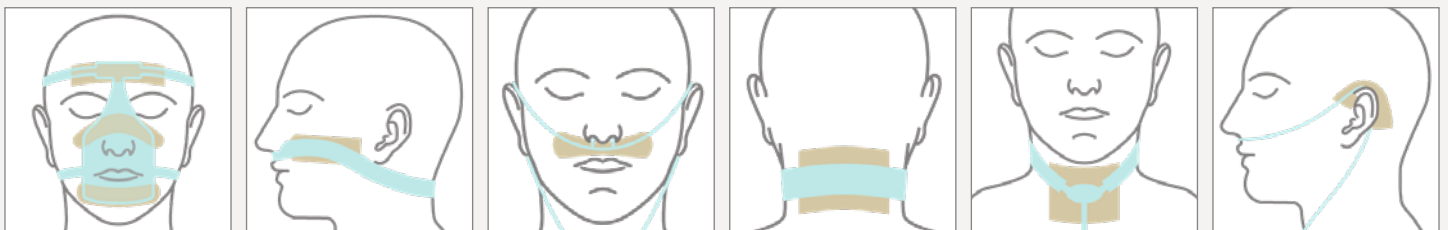



Mepilex® Lite


Mölnlycke®


Schnittanleitung

Wählen Sie die geeignete Verbandgröße, um den betroffenen Bereich abzudecken, und schneiden Sie den Verband so zu, dass er sich an die individuellen Bedürfnisse des Patienten/der Körperkonturen oder Geräteformen anpasst. Bringen Sie die haftende Seite auf die Haut auf.

Beispiele:

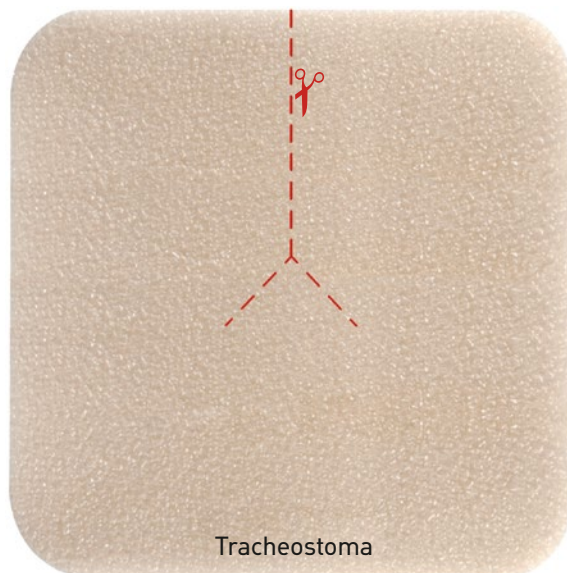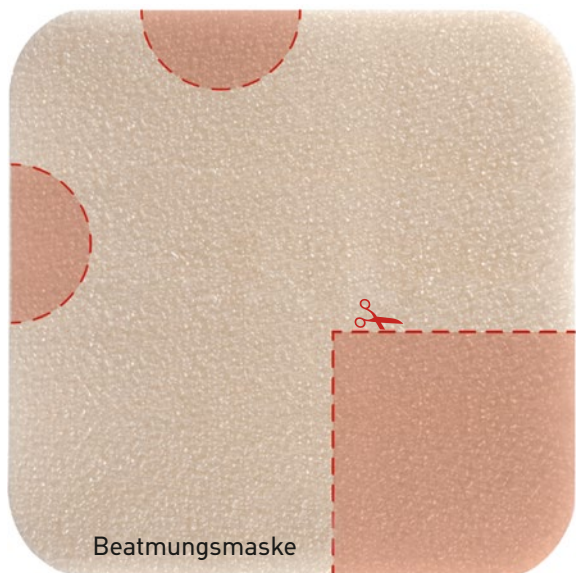

SafetaC
TECHNOLOGY

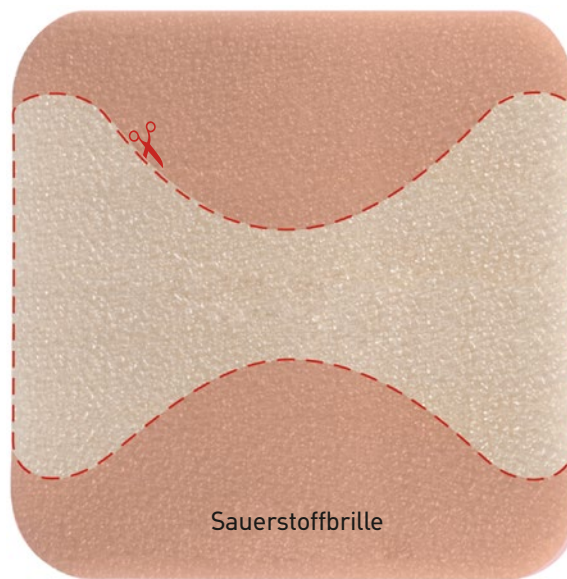

Mepilex® Lite Sortiment

Artikelnummer	Pharmazentralnr.	Größe cm	Stück Karton	Stück Packung
28 40 00	2829889	6 x 8,5	70	5
28 41 00	2829903	10 x 10	50	5
28 43 00	2829932	15 x 15	50	5
28 45 00	4100141	20 x 50	24	4

Steril – einzeln verpackt

Haftungsausschluss: Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zu verstehen und ersetzen nicht das unabhängige medizinische Urteil eines behandelnden Arztes. Diese Informationen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Vorschläge für die Tragedauer des Produktes, die Produktauswahl und die vorgeschlagene Anwendung, basieren auf Verallgemeinerungen und berücksichtigen nicht die Charakteristika der Wunde einer Person.

References: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.at

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien Tel +43 1 278 85 42-0, Fax +43 1 278 85 42-199, info.at@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care, das SafetaC® Logo und das Produkt Mepilex® Lite sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.


Mölnlycke®