

# Mepitac®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Skonsam tejp  
Skånsom tape  
Hellävarainen teippi

MD

Medicinteknisk produkt  
Medisinsk utstyr  
Medicinsk udstyr  
Lääkinnällinen laite



[www.molnlycke.com/symbols](http://www.molnlycke.com/symbols)



Mölnlycke®

Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,  
SE-402 52 Göteborg, Sweden

Made in Finland

Master 484571 Rev. 01

40427-39

PD-575610 Rev. 00

## Vad/Hva/Hvad är Mepitac®?

sv no da

Mepitac är en bekväm/formbar självhäftande selvklebende/selvklebende tejp/tape, som är enkel att applicera och avlägsna/fjerne. Mepitac är lämplig/egnet när upprepad/gjentatt/gentagen applicering och borttagning/fjerning/fjernelse är nödvändig, eftersom produkten innebär skonsam/skånsom borttagning/fjerning/fjernelse från hud och kroppsbe håring, säker/sikker fixering/fiksering och minimala rester efter borttagning/fjerning/fjernelse. Mepitac kan lyftas/løftes och appliceras igen, om/hvis inspektion eller omplacering är nödvändig. Mepitac är även/også vattenavstötande/vannavstøtende/vandafvisende. Materialinnehåll/Indhold: Polyuretanfilm, akrylathäfta/-heft/-klæb, polyester/polyapolyamidtricot, silikonhäfta/-heft/-klæb, polyetylenfilm

## Vad/Hva/Hvad används/brukes/bruges Mepitac® för/til?

Mepitac är avsedd/ment/beregnet til fixering/fiksering av medicinsk utrustning/udstyr såsom sårforband/sårbandasjer/sårbandager. Mepitac ger/tilbyr/giver skonsamt/skånsom skydd/beskyttelse för/af huden vid användning/bruk/brug under utrustning/udstyr såsom slangar/slanger.

## Försiktighetsåtgärder/ forholdsregler

- Mepitacs fästförmåga/festeevne/klæbeevne kan försämrars/svekkes/svækkes, om/hvis tejpem/tapem används/brukes/bruges vid/under fuktiga/fugtige förhållanden/forhold som till exempel på patienter som har feber eller svettas mycket/svetter mye/sveder meget.

- Får ej återanvändas/skal ikke gjenbrukes/må ikke genanvendes. Om/Hvis produktet återanvänds/gjenbrukes/genanvendes kan den/det ha/have nedsatt effekt, och korskontaminering/krysskontaminering/krydskontaminering kan förekomma/forekomme.
- Använd inte/bruk/brug ikke Mepitac på personer med känd/kendt överkänslighet/overfølsomhet mot/over for materialen/komponenterna i produkten.

## Bruksanvisning/Brugsanvisning

Hur ofta/Hvor ofte produktet behöver bytas/må byttes/skal skiftes är beroende/avhenger/afhænger av hudens tillstånd. Byt/Skift Mepitac när fästförmågan/festeevnen/klæbeevnen inte längre/længere är tillräcklig/tilstrekkelig/tilstrækkelig.

Avfall/Affald ska hanteras/håndteres enligt/ifølge lokala miljörutiner.


## Övrig information

Om/Hvis en allvarlig incident/alvorlig hendelse/hændelse med koppling till/forbundet med Mepitac inträffar/indtræffer ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care.


Mepitac® och Safetac® är registrerade varumärken/varemærker som tillhör Mölnlycke Health Care AB.

Upprättad/ Udsendt/Utgitt 2019-12

## Bruksanvisning/Brugsanvisning

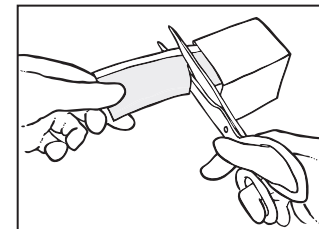

- Se till/Sørg for att huden är ren, torr/tør och fri från krämer/cremer, geler eller salvor etc.
- Klipp till den önskade tejpplängden/tapelængde med en sax/saks.

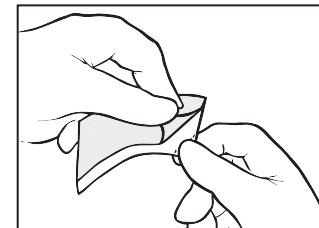

- Avlägsna/fjern skyddsfilm/beskyttelsesfilmen och applicera Mepitac utan att sträcka/strekke/strække den.
- Mepitac kan lyftas/løftes och appliceras igen om inspektion eller omplacering är nödvändig.

# Mepitac®

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Skonsam tejp  
Skånsom tape  
Hellävarainen teippi

MD

Medicinteknisk produkt  
Medisinsk utstyr  
Medicinsk udstyr  
Lääkinnällinen laite



  
Mölnlycke®

Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadvägen 3C, Box 13080,  
SE-402 52 Göteborg, Sweden

Made in Finland

Master 484571 Rev. 01  
40427-39  
PD-575610 Rev. 00

## Mikä on Mepitac®?



Mepitac on mukautuvainen kiinnitysteippi, joka on helppo asettaa ja irrottaa. Tuote sopii potilaille, jotka tarvitsevat toistuvaa käyttöä ja poistoa, sillä se tarjoaa samalla sekä hellävaraisen poiston ihosta ja ihokarvoituksesta että varman kiinnityksen, ja poistossa jää silti minimaalisesti jäämiä. Jos tarvitaan tarkistusta tai uudelleenasettelua, Mepitac voidaan irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen. Mepitac on myös vedenkestävä.

Materiaalit: Polyuretaanikalvo, akryyliiima, polyesteri-/polyamiditrikoo, silikonikiinnitysaine, polyeteenikalvo

## Mihin Mepitac® on tarkoitettu?

Mepitac on suunniteltu kiinnittämään sairaalavälineitä, kuten haavasidoksia. Mepitac on lisäksi hellävarainen ja suojaa ihoa, kun sitä käytetään laitteiden, kuten putkien, alla.

## Huomioitavaa

- Mepitacin kiinnitysvoima saattaa vähentyä kosteassa ympäristössä, kuten potilailla, joilla on kuumetta tai jotka hikoilevat paljon.
- Älä käytä tuotetta uudelleen. Uudelleen käytettäessä tuotteen toimintakyky voi heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.
- Älä käytä Mepitacia henkilöille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä valmisteen materiaaleille/komponenteille.

## Käyttöohjeet

Vaihtoväli riippuu ihon kunnosta. Vaihda Mepitac, kun tarttuvuusominaisuudet eivät enää ole riittävät.

Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaan.


## Muita tietoja

Jos Mepitac-kiinnitysteipin käytön yhteydessä ilmenee vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle.


Mepitac® ja Safetac® ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä

Julkaistu 2019-12

## Käyttöohjeet

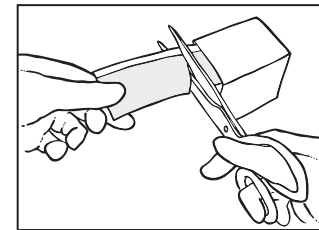

1. Varmista, että iho on puhdas ja kuiva eikä siinä ole voiteita yms.
2. Leikkaa saksilla haluttu pituus teippiä.

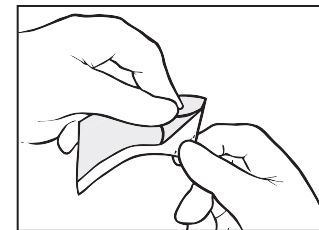

3. Poista suojaava taustakalvo ja aseta Mepitac venyttämättä.
4. Jos tarvitaan tarkistusta tai uudelleenasettelua, Mepitac voidaan irrottaa ja asettaa uudelleen paikoilleen.