

# Alipainehoidon edistäminen, tavoitteena positiiviset tulokset

Avance® Solo on paristoilla toimiva, kertakäyttöinen alipaineimuhoitolaite. Sen tarkoituksena on edistää haavan nopeampaa paranemista, potilaan liikkuvuutta ja vähentää infektioriskiä.

Avance® Solo pumpussa on sekä äänelliset että näkyvät hälytykset **vuodolle, tukokselle sekä paristojen alhaiselle tilalle**<sup>1,2</sup> – se mahdollistaa **nopean reagoinnin ongelmiin ja siten hoidon jatkumisen keskeytyksettä**<sup>3,4</sup>

Tuottaa jatkuvan -125mmHg alipaineen **14 vuorokauden ajan**<sup>1,5</sup>

Pumpun säännöllinen käyntiäänä on **vahvistus siitä, että pumpu toimii, siirtää eritettä ja ylläpitää paineen tavoitellulla tasolla.**

Erite siirtyy sidoksesta 50ml säiliöön. **Eritteen jakautuminen sidoksen ja säiliön välillä estää sidosta täyttymästä kokonaan.**<sup>5</sup>

Kiinnitysteipit

Avance® Solo Border -sidos hellävaraisella Safetac® -kiinnityksellä, jonka on **todettu vähentävän kipua** haavalla ja haavaa ympäröivällä iholla sidosta poistaessa.<sup>6-9</sup>

Avance® Solo

  
Mölnlycke®

## Miten Avance® Solo toimii?

Avance® Solo on kertakäyttöinen paristoilla toimiva haavan alipaineimuhoidolaite. Se siirtää eritteen haavalta sidokseen ja säiliöön. Alipaineimuhoidolaite tuottaa jatkuvan ~125mmHg<sup>5</sup> paineen ja sitä voi käyttää sekä suljetuilla kirurgisilla haavoilla että avoimilla haavoilla.

## Mitkä ovat Avance Solon hyödyt?

- Tuottaa 125mmHg jatkuvan alipaineen 14 vuorokauden ajan<sup>1,5</sup>
- Controlled Fluid Management (CFM) -teknologia mahdollistaa alipaineen ylläpitämisen siirtämällä eritteen haavalta 50 ml:n säiliöön<sup>5,10,11</sup>
- Avance Solo Border-sidos muotoutuu vartalolle myös hankalissa paikoissa.<sup>12</sup> Safetac® -kiinnityksen on todettu vähentävän kipua haavalla ja haavan ympäristössä sidosta poistettaessa.<sup>6-9</sup>
- Avance Solo pumpussa on sekä äänelliset että näkyvät hälytykset vuodolle, tukokselle sekä paristojen alhaiselle tilalle.<sup>1,2</sup> Ongelma havaitaan välittömästi ja hoitoa pystytään jatkamaan keskeytyksettä.<sup>3,4</sup>

## Käyttöalueet

### Suljetut kirurgiset haavat (ciNPT)

Avance Solo alipaineimuhoidolaite poistaa eritettä suljetulta leikkaushaavalta kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Avance Soloa voi käyttää mm. ortopedisten toimenpiteiden (primäärinen artroplastia ja revisio), kardio- ja thoraxkirurgisten (ohitusleikkaus, avosydänleikkaus), gynekologisten (sektiot ja abdominaalinen hysterectomia), yleis- ja kolorektaalikirurgisten (laparotomia, napatyryä), verisuonkirurgisten (nivusleikkaus), plastiikkakirurgisten (vatsanseinämän rekonstruktiot ja rinnanpoisto) leikkaushaavoille.

### Avoimet haavat (dNPWT)

Akuuteille ja kroonisille haavoille. Avance Solo on suunniteltu vähän ja kohtalaisesti erittävien haavojen hoitoon. Avance Soloa voidaan käyttää kroonisilla haavoilla, akuuteilla haavoilla, traumahaavoilla, subakuuteilla haavoilla, uudelleen auenneilla leikkaushaavoilla sekä ihosiirrekohdilla.



Kontraindikatioiden, varoitusten ja varovaisuuden osalta, katso käyttöohjeet.

## Avance Solo valikoima

| Tuotenro. | ciNPT  | kpl/osastopakk. | kpl/kuljetuspakk. |
|-----------|--|-----------------|-------------------|
| 8881020   | Avance Solo -setti (10cm x 20cm)<br>sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos | 1               | 2                 |
| 8881030   | Avance Solo -setti (10cm x 30cm)<br>sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos | 1               | 2                 |
| 8881035   | Avance Solo -setti (10cm x 35cm)<br>sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos | 1               | 2                 |
| 881020    | 10cm x 20cm sidos  | 2               | 4                 |
| 881030    | 10cm x 30cm sidos  | 2               | 4                 |
| 881035    | 10cm x 35cm sidos  | 2               | 4                 |
| Tuotenro. | dNPWT  |                 |                   |
| 8880050   | Pumppu ja säiliö -setti  | 1               | 2                 |
| 880050    | Vaihtosäiliö   | 4               | 8                 |
| 881515    | 15cm x 15cm sidos  | 2               | 4                 |
| 881520    | 15cm x 20cm sidos  | 2               | 4                 |
| 881530    | 15cm x 30cm sidos  | 2               | 4                 |
| 882020    | 20cm x 20cm sidos  | 2               | 4                 |
| 882525    | 25cm x 25cm sidos  | 2               | 4                 |
| 882000    | Vaahdotäyte haavalle (1,5 x10 x 12 cm)   | 4               | 8                 |

Viitteet: 1. Avance Solo CMM Data on file [ref 16]. 2. Avance Solo CMM Data on file [ref 17]. 3. Avance Solo CMM Data on file [ref 14]. 4. Avance Solo CMM Data on file [ref 15]. 5. Avance Solo CMM Data on file [ref 10]. 6. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 7. Silverstein P. et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. Journal of Burn Care and Research, 2011. 8. Gee Kee E.L. et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns, 2014. 9. Solanilla A.C. et al. Prospective, randomized, non-inferiority investigation to compare effects of Mepitel® One and UrgoTul®. 10. Avance Solo CMM Data on file [ref 11]. 11. Avance Solo CMM Data on file [ref 13]. 12. Avance Solo CMM Data on file [ref 18].

## Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 3. krs, 00380, Helsinki. Puhelin 0201 622 300  
Mölnlycke, Avance ja Safetac -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle  
Mölnlycke Health Care -konsernin yhtiöille. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC1162010

