



## BARRIER® Champ d'épaule avec Drisite® Plus\*

- Poche de recueil intégrée, pour une gestion efficace des fluides
- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Le bord adhésif en plastique du côté de la plaie permet un positionnement parfait du champ et une adhérence optimale de la poche supplémentaire
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliage optimal, pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne




**Utilisez le velcro  
pour maintenir les  
tubulures et les câbles.**

\* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.

# Instructions d'utilisation



1. Faites glisser la stockinette sur la main mais sans la dérouler entièrement.

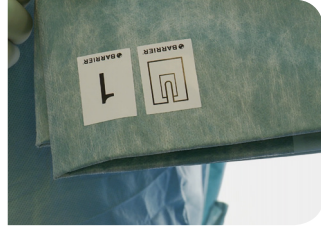

2. Notez la direction du pictogramme sur le premier champ fendu.



3. Placez la fente sous le bras. Dépliez le champ de chaque côté du torse, puis vers les pieds du patient. Dépliez les rabats de la fente en direction des pieds.



4. Déroulez la stockinette. Repliez la couche confort absorbante de la stockinette vers l'intérieur pour éviter tout risque de contaminations microbiennes.



5. Retirez le papier protecteur du champ fendu. Appliquez ensuite le champ aussi bas que possible autour de l'épaule du patient.



6. Notez la direction du pictogramme sur le deuxième champ fendu. Dépliez le champ de chaque côté de la tête du patient, puis par-dessus. Retirez les papiers protecteurs.



7. Posez le deuxième champ de manière à recouvrir le premier, et non bord à bord, afin de former une barrière sûre.



8. Donnez forme à la poche avec les flexibles intégrés (si elle est incluse).

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Mölnlycke ou pour visionner des vidéos d'instructions.



N° de réf.	Description	Disp/Trp
60001	<b>Trousse d'épaule</b> 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 1 stockinette 22x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu supérieur pour épaule 240x170cm, fente 15x45cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60002	<b>Trousse d'épaule avec poche</b> 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 1 stockinette 22x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	4/8
60005	<b>Champs fendus avec poche</b> 1 champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm 1 champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm 1 champ d'emballage 112x112cm	4/8

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse Mölnlycke®.

N° de réf.	Composants de trousse
70005	Champ fendu supérieur pour épaule 240x170cm, fente 15x45cm
70006	Champ fendu supérieur pour épaule avec poche 240x170cm, fente 15x45cm
70007	Champ fendu inférieur pour épaule 230x295cm, fente 10x70cm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, BE-2600 Berchem, Belgique  
Tél. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.

Le nom et le logo de Mölnlycke® et BARRIER® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.  
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00891702)