

Procedure til påtagning af operationskitler

Tag den sterile kittel og gå ind i et område, hvor kitlen kan åbnes uden risiko for kontaminering.



1. Stik begge hænder ind i ærmehullerne. Hold kitlen på afstand af kroppen og lad den folde sig helt ud.




2. Lad begge hænder glide ind i ærmehullerne og ærmerne, hold hænderne på skulderniveau og på afstand af kroppen.



3a. Ved åben handskepåtagning, trækkes manchetten hen til tommelfingerniveau.

3b. Ved lukket handskepåtagning, skubbes hænderne frem til manchetkanten (lille billede).

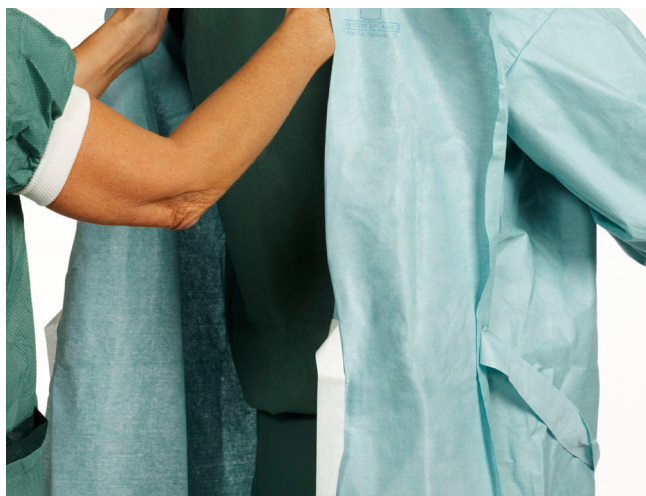

4. Den assisterende person bør trække kitlen op over skulderne, idet han/hun kun berører indersiden af kitlen.



5. Arrangér velcrolukningen i nakken.



6. Bind kitlens indvendige bånd.



7. Når handskerne er taget på, tages der fat i båndets pap med begge hænder. Adskil det venstre udvendige bånd fra pappet og hold båndet i venstre hånd.



8. Giv båndets pap til den assisterende person og drej så trekvart gang mod venstre, mens den assisterende person trækker det udvendige bånd ud til sin fulde længde.



9. Træk båndet ud af pappet, som den assisterende person holder, og bind det sammen med det udvendige bånd på venstre side.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIERE varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0731710