

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 40549000

バイオジェル スキンセンス

(バイオジェル スキンセンス インディケーター アンダーグローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、非天然ゴムであるポリクロロブレンゴムラテックスからなる、滅菌済みの使い捨て手術用ゴム手袋である。

1. 形状
 - ・形状 C（曲指形手袋）
 - ・表面仕上げ P（表面が平滑な手袋）
 - ・パウダなし
 - ・左右の区別あり
2. 材質
 - ポリクロロブレンゴムラテックス

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護すること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと本品を取り出す。
2. 無菌操作にて本品を装着する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 手袋にピンホールなどの異常が認められた場合は使用しないこと。
- (2) 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- (3) 電気メス等の使用において、高周波電流の形成により熱傷を起こす可能性があるため、注意すること。

2. 相互作用

- (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。
- ・使用期限は包装に記載。（自己認証データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社

電話：03-6914-5006

製造業者（国名）：

メンリッケヘルスケア Sdn. Bhd.（マレーシア）

Molnlycke Health Care Sdn. Bhd.