

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋 40549000

バイオジェル PI マイクロ

再使用禁止 (バイオジェル PI マイクロ インディケーター システム)

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*** 【形状・構造及び原理等】**

本品は、医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護するために使用するポリイソブレン製の手術用手袋である。バイオジェル PI マイクロ（外側）とバイオジェル PI マイクロ インディケーター アンダーグローブ（内側）を1つの包装にした製品である。バイオジェル PI マイクロ インディケーター アンダーグローブは青色をしているため、2重装着した場合、外側手袋のピンホール等、破損を生じた部位の確認ができる。

1. 形状
- ・形状C（曲指形手袋）
 - ・表面仕上げP（表面が平滑な手袋）
 - ・パウダなし
 - ・左右の区別あり

・サイズ

システム サイズ	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
外側手袋 サイズ	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5
内側手袋 サイズ	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0

2. 材質
ポリイソブレン

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護すること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、台紙ごと本品を取り出す。
2. 無菌操作にて本品を装着する。

*** 【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意
- (1) 手袋にピンホールなどの異常が認められた場合は使用しないこと。
 - (2) 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
 - (3) 電気メス等の使用において、高周波電流の形成により熱傷を起こす可能性があるため、注意すること。
2. 相互作用
- (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。

*** 【保管方法及び有効期間等】**

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。
- ・使用期限は包装に記載。（自己認証データによる。）

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社
電話：03-6914-5006
製造業者（国名）：
メンリッケヘルスケア Sdn. Bhd.（マレーシア）
Molnlycke Health Care Sdn. Bhd.