

# BARRIER® Handlakan



- Tredimensionell design som ger förbättrad täckning
- Effektiv absorption hjälper till att upprätthålla ett torrt arbetsområde
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk hantering, lätt för en person att drapera



1. Håll lakanet i rätt läge.



2. Vik ut lakanet en gång och titta på piktogrammet, den här handen är patientens hand.



3. Vik ut lakanet i din riktning så att du har ett skydd mellan dig och arm/handbordet. Veckla sedan ut lakanet i den andra riktningen.



4. Vik ut lakanets nedre del mot fotändan. Vik därefter ut lakanets övre del upp mot huvudändan över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiionsyta	Art./Trp.
60310	Handlakan: 1 x Handlakan, elastiskt hål 3.5 cm	150/370 x 280cm		7 / 14
60305	Hand set: 1 x Handlakan, elastiskt hål 3.5 cm 1 x Instrumentbordslakan	150/370 x 280cm 150 x 190cm	75 x 190cm	6 / 12
60306	Hand set: 1 x Assistansbordspåse 1 x Handlakan, elastiskt hål 3.5 cm 1 x Instrumentbordslakan	79 x 145cm 150/370 x 280cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	5 / 10
60307	Hand Set 1 x Assistansbordspåse 1 x Handlakan, elastiskt hål 3.5 cm 1 x Instrumentbordslakan 1 x Omslagspapper	100 x 150cm 150/370 x 280cm 150 x 190cm	75 x 150cm 75 x 190cm	5 / 10

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70310	Handlakan, elastiskt hål 3.5 cm	150/370 x 280cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0361803

**Mölnlycke®**