

BARRIER® Höftset med Drisite® Plus



- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
-
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Optimal vikning för aseptisk applicering, enkelt för en person att drapera




1. Börja med att vika ut instrumentbordslakanet och placera det under patientens ben.



2. Täck benet med ortopedistrumpan. Vik det absorberande komfortskiktet på ortopedistrumpan på sig själv för att undvika risken för mikrobiell överföring. Fixera sedan med op-tejp.



3. Placera slitslakanet under patientens ben.

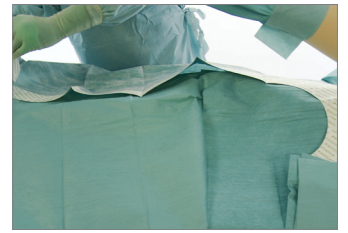

4. Vik först ut sidorna på lakanet och sedan mot fötterna. Ta bort skyddspapperet.



5. Applicera slitsen runt och under genitalierna och längs kroppen. Fäst den andra sidan längs höften och sidan av patienten.



6. Ta bort den mittersta delen av skyddspapperet på lakanet mot narkosbågen. Placera handen inuti vikningen på draperingen och placera lakanet på patienten.



7. Vik delvis ut lakanet och ta bort det 2: a och 3: e skyddspapperet. Fortsätt veckla ut lakanet, först mot dig och sedan bort från dig.



8. Vik ut lakanet helt mot patientens huvud.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtionsyta	Avd/Trp
60604	Höftset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Op-handduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Op-lakan 3 x Op-tejp 1 x Slitslakan, slits 20x102cm 1 x Häftande op-lakan 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 75 x 90cm 150 x 190cm 90 x 150cm 9 x 49cm 200 x 260cm 300 x 175cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	4 / 8
60608	Höftset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Op-handduk 1 x Instrumentbordslakan 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Slitslakan, slits 20x102cm 1 x Häftande op-lakan 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 75 x 90cm 150 x 190cm 32 x 120cm 9 x 49cm 200 x 260cm 300 x 175cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	4 / 8
60612	Höftset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Op-handduk 1 x Instrumentbordslakan 2 x Häftande op-handduk 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Slitslakan, slits 20x102cm 1 x Häftande op-lakan 1 x Häftande op-lakan 1 x Sug- och diatermpåse 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 75 x 90cm 150 x 190cm 75 x 75cm 32 x 120cm 9 x 49cm 200 x 260cm 175 x 175cm 300 x 175cm 40 x 35cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm 75 x 190cm	3 / 6

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Absorbtiönsyta	Avd/Trp
60613	Höftset: 4 x Cellduk 1 x Instrumentbordslakan 2 x Op-tejp 1 x Slitslakan, slits 20x102cm 1 x Häftande op-lakan 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	18 x 25cm 150 x 190cm 9 x 49cm 200 x 260cm 300 x 175cm 150 x 190cm	75 x 190cm 75 x 190cm	5 / 10
60614	Höftset: 1 x Förstärkt assistansbordspåse 4 x Cellduk 1 x Häftande op-lakan 2 x Häftande op-handdukt 1 x Ortopedistrumpa 2 x Op-tejp 1 x Elastiskt bandage 1 x Slitslakan, slits 20x102cm 1 x Häftande op-lakan 1 x Förstärkt instrumentbordslakan	79 x 145cm 18 x 25cm 175 x 175cm 90 x 75cm 32 x 120cm 9 x 49cm 12 x 500cm 200 x 260cm 240 x 175cm 150 x 190cm	65 x 85cm 75 x 190cm	3 / 6

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke kundanpassade set.

Art. nr.	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70503	Slitslakan, häftande slits 7 x 102cm, förstärkt 70 x 100cm	200 x 260cm
70504	Slitslakan, häftande slits 20 x 102cm, förstärkt 70 x 100cm	200 x 260cm
70511	Slitslakan, häftande slits 20 x 102cm, förstärkt 70 x 160cm	230 x 330cm
70513	Slitslakan, häftande slits 20 x 102cm, förstärkt 70 x 160cm	250 x 290cm

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0421803

